



Mit  
dem  
isi  
hi  
geht's  
easy...

**Entwicklung und Verkauf:**

Praxisgemeinschaft RhyPark  
Ergotherapie  
Rheinweg 4  
8200 Schaffhausen  
Tel. 052 / 624 27 11  
info@ergo-rhyPark.ch  
www.ergo-rhyPark.ch

**Produktion:**

altra schaffhausen  
Schreinerei Holzwerk  
Nordstrasse 147  
8200 Schaffhausen  
Tel. 052 / 632 29 06  
info@altra-sh.ch  
www.altra-sh.ch



isi  
hi

Der praktische  
Hilfssitz für  
Gartenarbeiten

## Der Hilfssitz

### 1. Höhe einstellen

Wählen Sie den für Sie passenden Dorn und montieren Sie diesen an der Sitzfläche. Je nach Beschaffenheit des Bodens schrauben Sie den Einsinkstopper höher oder tiefer fest.

### 2. Umschnallen

Binden Sie den Gurt um Ihre Hüften, sodass der HiSi fest sitzt.

### 3. Pflücken und Jäten

Setzen Sie sich auf den HiSi, der Dorn bohrt sich bis zum Einsinkstopper in die Erde. Sie können nun ganz entspannt Pflücken, Jäten oder Säen. Wenn Sie sich bewegen, passt sich der HiSi automatisch Ihrer Körperposition an.



Ob bei Gartenarbeiten, in den Reben oder beim Beerenpflücken: der Hilfssitz macht das Arbeiten im Freien einfacher!

### Für wen ist der HiSi geeignet?

Der HiSi eignet sich für Gartenfreunde und Rebauern, die Wert auf gesundheitsschonendes Arbeiten legen. Tätigkeiten im Knien oder in der Hocke können sich belastend auf Knie, Füsse, Rücken und letztendlich auf die Schultern auswirken. Wer bereits Beschwerden, degenerative Veränderungen oder ein Kunstgelenk in den Knien hat, dem bietet der Hilfssitz Entlastung bei Gartenarbeiten. Der HiSi ist belastungsfähig bis 100 Kilogramm Körpergewicht.

**Achtung:** Eher ungeeignet ist der HiSi für Personen mit eingeschränkter Hüftbeweglichkeit sowie bei Gleichgewichtsproblemen.

### Beim Kauf eines HiSi erhalten Sie:

- Sitzfläche
- Gurt
- Kleiner und grosser Dorn
- Einsinkstopper
- Stoffsack für Aufbewahrung

**Verkaufspreis: CHF 85.00, inkl. MwSt.**



**isi**  
**hi**